

## **Gebruiksaanwijzing voor de oogspoelfles**

De volgens EN 15154-4 gevulde oogspoelflessen zijn bestemd als eerste-hulp middel voor het uitspoelen van stofdeeltjes en vreemde stoffen uit de ogen. Het spoelen is geen vervanging van een eventueel nader onderzoek door een oogarts.

Oogspoelflessen op de werkplek binnen handbereik bewaren. Fles beschermen tegen koude en Zonlicht.

### **In geval van nood**

- **verwijder het beschermkapje**
- **buig over de fles heen of houd de fles boven het oog**
- **houd met duim en wijsvinger het oog geopend**
- **druk de sproeikop zachtjes tegen de oogholte en spoel het geopende oog door herhaaldelijk de fleswand in te drukken**

Bij ernstige oogongevallen zal het ooglid zich in een reflexbeweging sluiten, waardoor het voor de gewonde vak onmogelijk is zelf adequaat te spoelen. In zulke gevallen is eerste hulp door iemand die direct in de buurt is, noodzakelijk.

Raadpleeg onmiddellijk na de oogspoeling een arts.

Let er op dat de sluitzegel niet verbroken is. Na verbreking van de verzegeling mag de fles niet meer worden gebruikt.

De watervulling blijft, zolang de fles verzegeld is, 2 jaar goed. Uiterlijk houdbaar tot: zie sticker.

Vervang na beëindiging van de houdbaarheidsgarantie de oogspoelfles door een nieuwe, ook wanneer de oogspoelfles niet gebruikt is.